

DOWNLOAD, REGISTRAZIONE E ACCESSO ALL'APP FREESTYLE LIBRELINK



Il **paziente**:


1. Cerca l'app sullo Store (**Apple App Store** o **Google Play**) digitando «FreeStyle LibreLink»




2. Scarica e installa l'app **FreeStyle LibreLink***




3. Apre l'app FreeStyle LibreLink e:
 - se **ha un account LibreView** clicca su «**Accedi**» e inserisce le sue credenziali di accesso
 - se **non ha un account** seleziona «**Inizia adesso**» e segue le istruzioni indicate compilando quanto richiesto

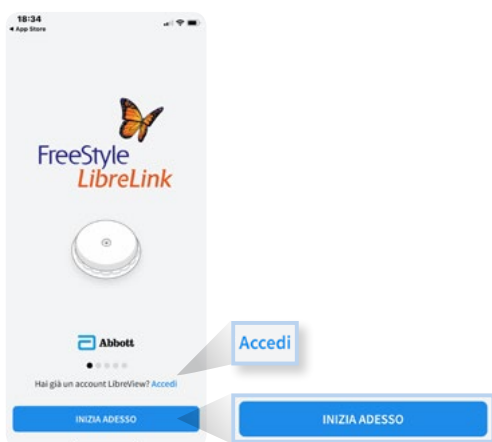


4. Seleziona «**Avanti**» per confermare l'unità di misura del glucosio; seleziona le impostazioni desiderate di intervallo del glucosio (il range glicemico è preimpostato su valori standard ma è personalizzabile) e clicca su «**Avanti**»

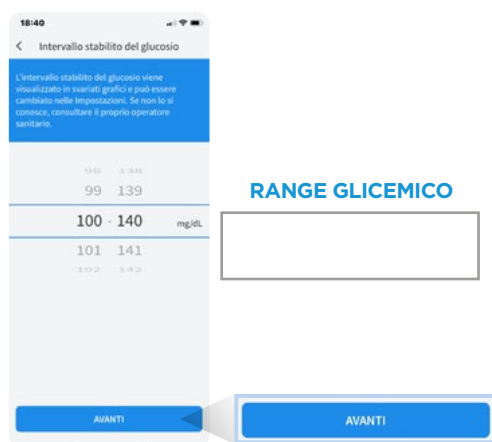

5. Seleziona l'unità di misura dei carboidrati desiderata (grammi o porzioni) e clicca su «**Fine**»

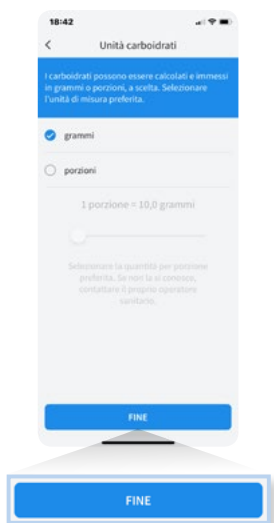

6. Inizia a utilizzare l'applicazione seguendo le istruzioni indicate
N.B. L'utilizzo dell'app tramite smartphone si può attivare in qualsiasi momento

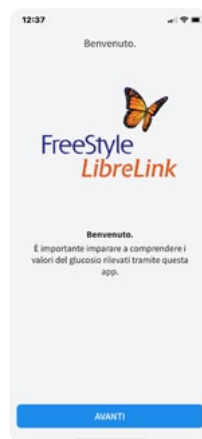

* L'app è disponibile per gli smartphone dotati di lettore NFC compatibili.

Android: controllare caratteristiche tecniche dispositivo. Apple: iPhone 7 o superiore.

LibreView è un dispositivo medico CE. FreeStyle LibreLink è un dispositivo medico CE0086. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Per maggiori informazioni:



www.FreeStyleLibre.it

e-mail: HCP_Support_it@libreview.cust-serv.com




OPZIONE A: IL MEDICO AGGIUNGE IL PAZIENTE TRAMITE E-MAIL

Il **medico** inserisce i dati personali e l'e-mail del paziente sulla piattaforma LibreView e lo invita a condividere i propri dati del glucosio

N.B. Se il paziente si è già registrato sull'app FreeStyle LibreLink, inserire la stessa e-mail di registrazione

Il **paziente**:

1. Riceve l'**e-mail** con la richiesta di condivisione dei dati
2. Accetta l'invito e viene re-indirizzato alla pagina dove deve effettuare il **login*** oppure deve creare un **nuovo account** LibreView seguendo le istruzioni indicate per procedere**
3. Clicca su «**Accetta**» quando compare la richiesta di condivisione

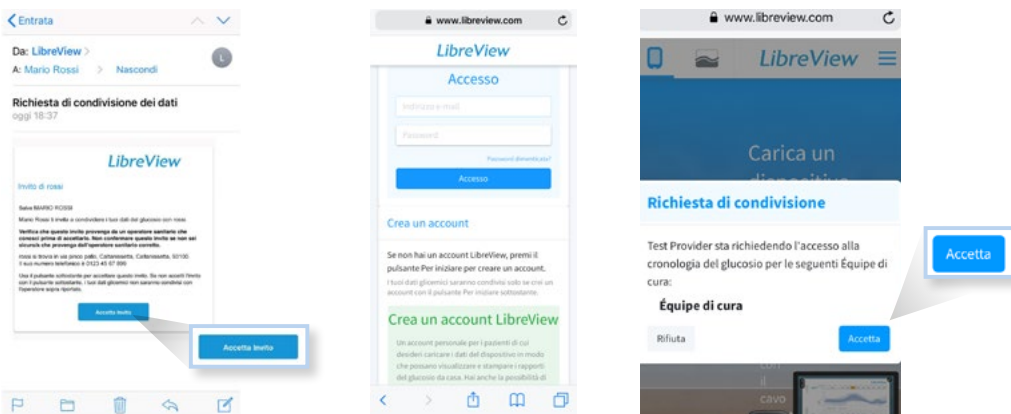

OPZIONE B: IL PAZIENTE AGGIUNGE SUL SUO PROFILO LIBREVIEW L'ID STUDIO DEL MEDICO


Il **medico** individua e fornisce l'ID dello studio sotto **Menu/I miei studi**

ID STUDIO



Il **paziente**:

1. Effettua il login* su **www.libreview.com** o crea un nuovo account LibreView**
2. Accede alla sezione «**I miei studi**» (Menu/Impostazioni account/I miei studi)
3. Aggiunge l'ID studio nel campo «**Link a uno studio**»
4. Clicca su «**Aggiungi**»

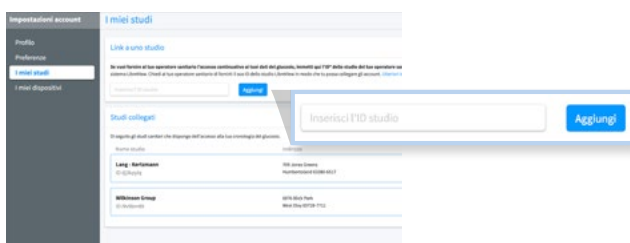

Se il paziente utilizza l'app FreeStyle LibreLink i dati si aggiornano automaticamente in tempo reale; se invece utilizza il lettore FreeStyle Libre deve collegarlo al computer tramite cavo USB per sincronizzare i dati su **www.libreview.com**

* Se il paziente ha già effettuato la registrazione sull'app FreeStyle LibreLink deve inserire le stesse e-mail e password dell'applicazione.
** È possibile utilizzare computer, smartphone o tablet.

Per maggiori informazioni:



www.LibreView.com

e-mail: HCP_Support_it@libreview.cust-serv.com

